

# NADAL® COVID-19 Ag Test Bruksanvisninger

(Ref. 243117N+05)


antigen hurtigtest for selvbruk  
for påvisning av COVID-19  
patogen SARS-CoV-2 i nasale  
smøppler



Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen.  
Utfør testen ved romtemperatur (15-30°C). For dette formålet  
må testen først stå ved romtemperatur i 30 minutter.

Ikke bruk testen etter utløpsdatoen eller hvis noen av emballa-  
sjen er skadet. Barn og ungdom under 18 år bør bistås av for-  
eldre eller en autorisert voksen.

## Pakkens innhold

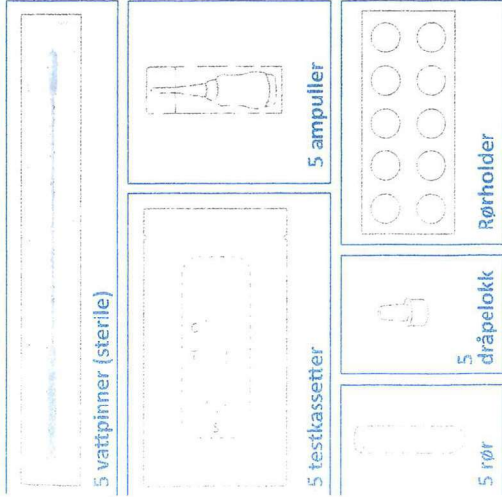

## Ytterligere materialer som kreves

Videoinstruksjoner er også tilgjengelig.  
Bare skann denne koden



Klokker

## Testprosedyre

1. Plasser rørholderen på bordet. Plasser et rør i en åpning.






2. Åpne ampullen ved å vri spissen.

3. Hell all væsken i røret. Klem ampullen mens du holder den over røret.

4. Blås nesen din i papir.




5. Åpne vattinneemballasjen. For å gjøre dette, trekk de løse endene av emballasjen fra hverandre. Ta ut vattinnen ved skafet. Ikke rør tuppen av vattinnen.

Gjennomfør alle trinn uten avbrudd

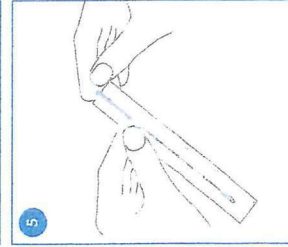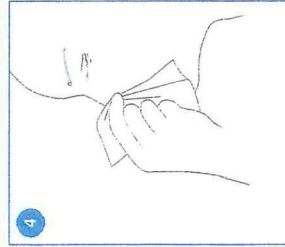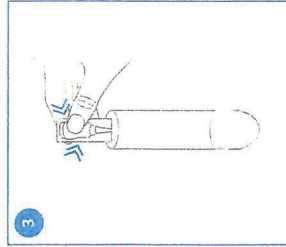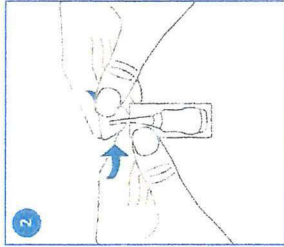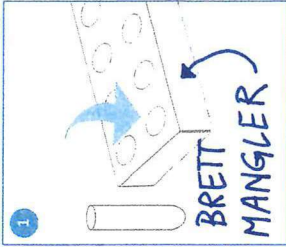

## 6. Prøvetaking

- Før vattippen ca. 2 cm inn i neseboret.
- Roter vattippen forsiktig 5 ganger mot neseveggen. Vattippen skal være i neseboret i 15 sekunder.
- Ta vattippen ut av nesen mens du roterer den lett.
- Gjenta prosessen i det andre neseboret med den samme vattippen, også i 15 sekunder.

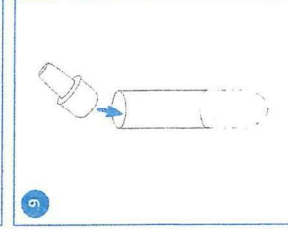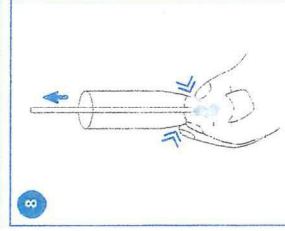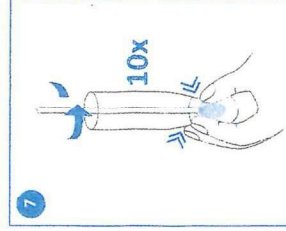


7. Før vattippen inn i røret. Roter vattippen mens du klemmer nedre del av røret 10 ganger, slik at det presser litt på vattippenetuppen.

8. Ta ut vattippen, trykk sidene av røret sammen for å presse ut så mye væske som mulig fra vattippen.

9. Fest dråpelokket til røret. Sørg for at det sitter ordentlig på.

10. Åpne folieemballasjen og ta ut testkassetten. Tørkemiddelposen, som også er inkludert, er ikke nødvendig for testprosedyren og kan kastes. Plasser testkassetten på et plant underlag. Klem røret lett for å dispensere 3 dråper væske i testkassetts runde brønn (S) (IKKE det langstrakte resultatfeltet).

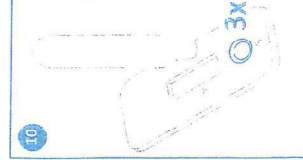

11. Se på klokken. Les resultatet etter 15 minutter. Resultatet er ikke lenger gyldig etter mer enn 20 minutter.



## Tolkning av resultat

Sørg for å lese testresultatet i et godt opplyst miljø.

Negativt testresultat:

Bare C-linjen vises i resultatfeltet. Ingen virus er oppdaget, det er ingen indikasjon på infeksjon med SARS-CoV-2.



Vær oppmerksom på: Et negativt resultat utelukker ikke muligheten for infeksjon. Fortsett å følge gjeldende forskrifter og sikkerhetstiltak når du kommer i kontakt med andre. Ved mistanke om infeksjon, gjenta testen etter 1-2 dager, siden ikke alle faser av infeksjonen er lett å påvise.

Positivt testresultat:

Både C-linjen og T-linjen vises i resultatfeltet. Dette indikerer en infeksjon med SARS-CoV-2.



Vær oppmerksom på: Intensiteten til T- eller C-linjen kan variere. Selv en veldig svak eller uregelmessig linje indikerer et positivt testresultat!

Merk: Kontakt lege eller helsestasjon umiddelbart på telefon, da resultatet må bekreftes med en PCR-test. Følg dine lokale retningslinjer for selvvisitasjon.

Ugyldig:

Ingen C-linje vises. Resultatet er ugyldig og indikerer en feil i testprosedyren.



Merk: Gjennomfør en ny test. I tilfelle ytterligere ugyldige resultater, kontakt fastlegen din eller et COVID-19 testsenter.